

# Antidekubitus: Fersen- und Ellenbogenschutz

Wenn besonderer Schutz der Ferse oder des Ellenbogens gefordert ist, können die Antidekubitus Fersen- und Ellenbogenschützer helfen.

## Indikation

- Zur Druckentlastung durch Reduzierung des Auflagedrucks  
Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

## Anwendungshinweise

Der Klettverschluss erlaubt eine schnelle und zuverlässige Fixierung. Sollte der Fersenschützer, z.B. aufgrund geschwollener Gelenke offen stehen, können Sie das beiliegende Polster unter den Klettverschluss schieben, um ein Scheuern auf der Haut zu vermeiden.

## Materialien

- Das Pneumolastic® Material entlastet nicht nur die vom Aufliegedruck gefährdeten Stellen, sondern reguliert zusätzlich das Hautklima und führt Feuchtigkeit ab. Die Schützer sind universell für alle Größen verwendbar und verfügen über eine gute Passform.
- Polyester, Baumwolle, PE-Schaum, PUR-Schaum, Polyamid

## Wichtige Hinweise

Neben ständigem Umlagern des Patienten und z. B. Einreiben der Haut mit durchblutungsfördernden Salben, sollte auf eine weiche Lagerung geachtet werden. Durch das gerippte Material kann die Durchblutung der Haut gefördert werden und sich ggf. eine Streifenbildung abzeichnen.

## Pflege- und Waschinweise

- Siehe Wäscheetikett

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**

3075



3076



Art./REF	Bezeichnung
3075/Paar 3075/Stück	Fersenschutz
3076/Paar 3076/Stück	Ellenbogenschutz

