

# Kryotherm® natur Therapiehandschuh



Art./REF 8650



4 048486 216771

**Werkmeister**  


# Kryotherm® natur Therapiehandschuh

Der Kryotherm® natur Therapiehandschuh dient dem Kraft- und Beweglichkeits-training von Finger und Hand.

Die Füllung aus natürlichem Roggen kann schnell erwärmt bzw. gekühlt werden und erlaubt dadurch den Einsatz sowohl in der Wärme- als auch in der Kältetherapie. Der Therapiehandschuh eignet sich hervorragend zum täglichen Training in der Praxis oder zu Hause.

## Wärmetherapie (Backofen)

- Bei 100 °C ca. 10 – 12 Minuten erwärmen
- Beim Erwärmen immer Backpapier unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden

## Wärmetherapie (Mikrowelle)

- Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen
- Bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen so lange weiter erwärmen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist
- Verfügt die Mikrowelle über einen Drehteller bitte darauf achten, dass dieser sich frei drehen kann

## Kältetherapie

- Ca. 2 – 3 Stunden im Gefrierfach oder Eisschrank kühlen


## Bitte beachten

- Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
- Um Verbrennungen zu vermeiden, vor dem Gebrauch die Temperatur prüfen

## Anwendungshinweise

- Den Therapiehandschuh im erwärmten oder gekühlten Zustand öffnen und mit der Hand hineingreifen
- Um ein Austreten der Füllung zu verhindern, den Handschuh mithilfe des Klettbandes verschließen
- Durch greifende Bewegungen der Finger wird der gewünschte Therapieeffekt erreicht
- Nach dem Training die Hand vorsichtig herausziehen und den Handschuh mit dem Klettverschluss verschließen

## Materialien

- Füllung und Bezug: siehe Wäscheetikett
- Gummizug: 

## Pflege- und Waschinweise

- Nach dem Gebrauch im getrockneten Zustand lagern und erst nach vollständiger Trocknung wieder verwenden
- Das Produkt ist nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
- Um ein Austrocknen zu vermeiden, sollten Sie bei jeder zehnten Erwärmung eine Tasse Wasser mit in die Mikrowelle oder den Backofen stellen

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!**