

Wewa® Mobilisationsgurt

Der Wewa® Care Mobilisationsgurt erleichtert den Transfer und die Mobilisation von Patienten mit eingeschränkter Gang- und Standsicherheit, gleichzeitig wird das rückschonende Arbeiten gefördert.

Indikationen

- Zum sicheren und rückschonenden Transfer bei eingeschränkter Gang- und Standsicherheit
- Zur sicheren Mobilisation

Anwendung


- Den Wewa® Care Mobilisationsgurt um die Taille legen und das Steckschloss schließen
- Den Gurt so spannen dass er fest aber nicht einschneidend am Körper anliegt
- Transfer
 - Vor dem Patienten aufstellen und fest in die hinteren Schlaufen greifen
 - Aus den Knien heraus den Patienten in den Stand ziehen, dann in die gewünschte Richtung drehen
 - Den Patienten langsam absetzen
- Zur Erleichterung des Transfers empfiehlt sich die Verwendung des Wewa® Care Drehtellers
- Mobilisation
 - Neben dem stehenden Patienten den patientenseitigen Arm um die Taille legen und fest in eine Gurtschlaufe greifen
 - Mit der anderen Hand eine der seitlichen Gurtschlaufen greifen

Material

- siehe Einnähetikett

Reinigung und Pflege

- siehe Einnähetikett

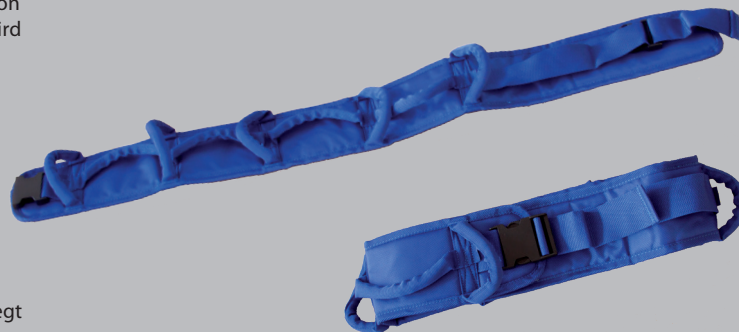

Art./REF	Beschreibung	Umfang	Größe
2174	Wewa® Care Mobilisationsgurt	70-110 cm	M
	Wewa® Care Mobilisationsgurt	110-140cm	L

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Diese weich gepolsterten Mobilisationsgürtel erleichtern den Transfer von immobilen Personen. Sie bieten verschiedene Greifpositionen und ermöglichen sowohl einen sicheren Griff der pflegebedürftigen Person als auch eine rückengerechtere Haltung. Das hochwertige Material sorgt für einen hohen Tragekomfort.