

Kalt- / Warmkompresse

Kompressen

Art./REF	Größe
8501	13 x 14 cm
8502	12 x 29 cm
8503	16 x 26 cm
8504	21 x 38 cm
8505	30 x 40 cm



Befestigungsbandage

Art./REF	Größe
8523	90 x 7,5 cm



Kombipack

Art./REF	Kompressengröße	Befestigungsbandage
8508	12 x 29 cm	90 x 7,5 cm



Kalt- / Warmkomresse

Die Kalt- / Warm-Komresse bietet schnelle Hilfe bei Schmerzen, Schwellungen, Prellungen und anderen Beschwerden.

Die Komresse ist

- **wiederverwendbar**
- **tiefkühlfähig und mikrowelleneeignet**

Jeder Kalt- / Warm-Komresse ist eine Schutzhülle aus hautfreundlichem Vliesmaterial beige packt.

Indikationen

Warmkomresse

- Gelenkrheuma
- Arthrose
- Hexenschuss
- Ischias
- Verspannungen der Muskulatur

Kaltkomresse

- Verstauchungen, Quetschungen, Blutergüsse etc.
- Nasenbluten
- Entzündungen
- Temperaturerhöhung
- Migräne

Nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Raynaud Syndrom, Herz-/Kreislaufkrankungen und Empfindungsstörungen. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie Ihren Arzt.

Anwendungshinweise

Warmkomresse

- In der Mikrowelle je nach Größe bei 280 Watt erwärmen
- 13 x 14 cm 2 Minuten
- 12 x 29 cm 4 Minuten
- 16 x 26 cm 4 Minuten
- 21 x 38 cm 6 Minuten
- 30 x 40 cm 10 Minuten
- Im Wasserbad bei max. 80°C ca. 5 - 10 Minuten erwärmen

Kaltkomresse

- Vor der Verwendung mindestens 2 Stunden bei max. -25°C im Gefrierschrank kühlen

Wichtige Hinweise

- Vor dem Erwärmen die Gelmasse gleichmäßig in der Komresse verteilen
- Sollte sich die Komresse während des Erwärmens in der Mikrowelle aufblähen, die Mikrowelle sofort ausschalten
- Die Komresse ist nur zur äußeren Anwendung gedacht, darf aber nie direkt auf die nackte Haut gelegt werden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Kinder mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen
- Bei Beschädigung die Komresse nicht mehr verwenden und mit dem Hausmüll (Restmüll) entsorgen

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Nicht einatmen: Nebel, Aerosole
- Rutschgefahr! Gel mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Universalbinder) aufnehmen


Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Nach Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen. Nachspülen
 - **Nach Augenkontakt:** Sofort die Augen mit viel Wasser spülen
 - **Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser trinken
- Bei Reizung oder Unwohlsein bitte einen Arzt hinzuziehen!

Materialien

- Komresse: Gel
- Schutzhülle: Vliesstoff aus Polypropylen

Pflege- und Waschinweise

- Komresse: Trocken und dunkel lagern
- Schutzhülle: 

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!