


# Rahmenfederschiene für Osteolind® / Fachhändlerinformation

## Beachten Sie beim Anpassen bzw. Anformen der Rahmenfederschiene folgende Hinweise:

- Zum Verformen die Schiene aus der Orthese nehmen
- Die Schiene ist ausschließlich zur Kaltverformung geeignet
- Zur Vermeidung von Schnittverletzungen Schutzhandschuhe tragen
- Unbedingt nur über ausreichend große Radien verformen. Das Abkanten über zu enge Radien kann Haarrisse und Brüche der Schiene zur Folge haben
- Sofern ein Hammer erforderlich ist, bitte ausschließlich einen Kunststoff-Hammer verwenden

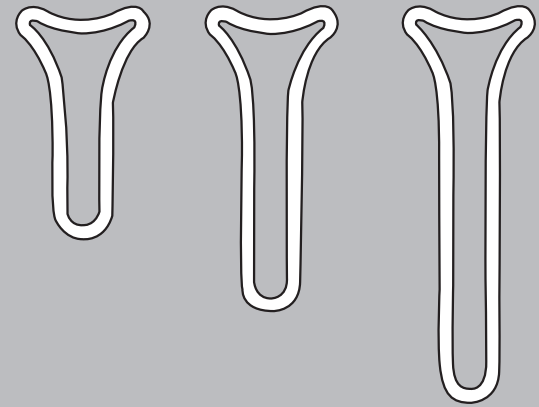

**Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei einer Person verwenden!**