

# Wewa® Med Patellabandage

Die Wewa® Med Patellabandage übt durch die flexible Silikonpelotte Druck auf die Patellasehne aus und sorgt so für eine korrekte Führung der Sehne und eine Entlastung in der Bewegung.

## Indikationen

- Patellaspitzensyndrom
- Chondropathia patellae
- Femoropatellare Arthrose

## Kontraindikationen

- Lymphabflussstörungen und unklare Weichteilschwellungen
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK)
- Empfindungsstörungen
- Hauterkrankungen im Anlagebereich der Patellabandage

## Anwendungshinweise

- Die Wewa® Med Patellabandage direkt unterhalb der Kniescheibe so positionieren, dass die Pelotte mittig auf der Sehne liegt
- Die Klettverschlüsse so schließen, dass Druck auf die Sehne ausgeübt wird jedoch ohne Stauungen unterhalb der Bandage zu verursachen
- Bei Bedarf die Spannung nachregulieren

## Materialien

- siehe Wäscheetikett

## Pflege- und Waschinweise

- siehe Wäscheetikett
- Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und falls möglich ein Wäschenetz verwenden

## Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

Bitte beachten Sie: Wenn Sie bei der Verwendung dieses Medizinproduktes Grund zu der Annahme haben, dass ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Händler, Hersteller und Ihrer nationalen Behörde!

HMV POS.-NR.  
05.04.01.1025



Art./REF	Größe	Farbe
60301	Universal	Grau/Schwarz